


## Anneaux de champ protecteur Adapt

### Renseignements généraux

- Utilisez pour combler ou épouser les contours inégaux de la peau péristomiale pour créer une surface plus plane
- Utilisez pour aider à empêcher l'écoulement de selles ou d'urine de se retrouver sous le champ protecteur
- Ils peuvent être découpés, étirés ou superposés pour améliorer l'ajustement du système de sac
- Pour votre commodité, des options de taille du diamètre externe de 2 po (épaisseur de 2,3 mm ou 4,5 mm) ou 4 po (épaisseur de 2,3 mm) sont disponibles

### Comment utiliser les anneaux de champ protecteur Adapt

1. Lavez et essuyez la peau à fond.
2. Retirez l'anneau de champ protecteur de l'emballage (illustration 1), puis enlevez les pellicules plastiques situées de chaque côté de l'anneau de champ protecteur (illustration 2).
3. Étirez et modelez l'anneau avant son application (illustration 3). Vous pouvez :
  - a. appliquer l'anneau contre la surface adhérente de votre champ protecteur (illustration 4), ou
  - b. appliquer l'anneau directement sur votre peau et appliquer ensuite le système de sac (illustration 5)
4. Si nécessaire, superposez des anneaux pour un meilleur ajustement (illustration 6).
5. Pour enlever, retirez doucement de la peau lorsque vous remplacez le système de sac.

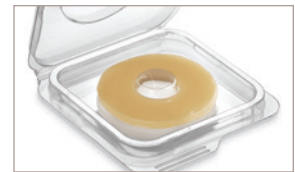

1 Retirez de l'emballage en plastique



2 Retirez les deux pellicules plastiques



3 Étirez pour mieux ajuster



4 Modelez l'anneau pour un ajustement personnalisé



5 Appliquez l'anneau à la peau, en s'assurant qu'il soit ajusté au point de rencontre entre la peau et la stomie



6 Superposez des anneaux pour un meilleur ajustement

### Questions et réponses

#### Comment savoir quelle taille d'anneau de champ protecteur utiliser — 2 po ou 4 po?

La plupart des patients considèrent que l'anneau de 2 po est plus facile à étirer ou modeler pour un ajustement personnalisé autour de la stomie. L'anneau de 4 po peut être utilisé comme champ protecteur complet pour stomie ou bien fractionné en morceaux plus petits afin d'assurer l'étanchéité autour de la stomie.

#### Pourquoi choisir un anneau de 2 po mince (2,3 mm d'épaisseur)?

Un anneau de champ protecteur mince est conçu pour être étiré et modelé comme la version ordinaire, mais offre un profil discret.

#### L'anneau de champ protecteur possède-t-il un dessus et un dessous?

Non, les deux côtés peuvent s'appliquer sur la peau.

#### Ma stomie n'est pas ronde. Puis-je quand même utiliser les anneaux de champ protecteur?

Oui, les anneaux de champ protecteur Adapt s'étirent et se modèlent facilement pour un ajustement personnalisé.

#### J'avais l'habitude d'utiliser de la pâte. Les anneaux de champ protecteur sont-ils plus efficaces que la pâte?

L'utilisation des anneaux de champ protecteur Adapt au lieu de la pâte présente plusieurs avantages. Pour certaines personnes, ils sont plus faciles à appliquer et à retirer que la pâte. Les anneaux durent plus longtemps et ont tendance à être plus résistants à l'érosion causée par les écoulements provenant de la stomie. La plupart des patients trouvent que les anneaux de champ protecteur éliminent le besoin d'utiliser la pâte.

#### Puis-je les utiliser si ma peau est irritée?

Oui\*. Les anneaux de champ protecteur Adapt sont sans alcool; par conséquent, ils ne causent pas de sensation de brûlure sur une peau éraflée ou irritée.

\* La peau irritée au pourtour de la stomie devrait être évaluée par un professionnel de la santé qualifié. Ce dernier pourra déterminer la cause de l'irritation et vous aider à trouver une solution.

# Anneaux de champ protecteur Adapt

## Instructions supplémentaires

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Anneaux de champ protecteur plat Adapt

Code d'art.	Diamètre externe	Épaisseur
7805	48 mm	4,45 mm
7806	98 mm	2,30 mm
7815	48 mm	2,30 mm



### Anneaux de champ protecteur convexe Adapt

Code d'art.	Forme	Diamètre interne
79520	Rond	20 mm
79530	Rond	30 mm
79540	Rond	40 mm
79601	Ovale	22 mm x 38 mm
79602	Ovale	30 mm x 48 mm
79603	Ovale	38 mm x 56 mm

Pour toute question sur les produits ou pour obtenir des échantillons, veuillez appeler le **1.800.263.7400**, ou visiter notre site Web [www.hollister.com](http://www.hollister.com)

Il est recommandé d'être suivi régulièrement par un professionnel de la santé.

Avant l'utilisation de tout produit ou accessoire pour stomie, assurez-vous de bien lire toutes les notices et étiquettes pour connaître les indications, les contre-indications, les dangers, les mises en garde, les précautions et le mode d'emploi.

**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400

